



558425 ZÁTĚŽOVÁ DEKA VELKÁ

Bezpečnostní pokyny

Zátěžová deka je vyrobena z měkké 100% polyesterové tkaniny a obsahuje 108 čtvercových kapes naplněných malými polypropylenovými peletami. Tato konstrukce poskytuje jemnou, rovnoměrně rozloženou hmotnost, která může nabídnout uklidňující proprioceptivní vjemy pro děti.

▲ Důležité:

Tento produkt musí být vždy používán pod přímým dohledem zodpovědné dospělé osoby. Doporučujeme konzultaci s ergoterapeutem nebo fyzioterapeutem, aby určil nejvhodnější hmotnost deky a bezpečné intervaly používání pro vaše dítě.

Při používání zátěžové deky:

1. Vyberte nejlehčí efektivní hmotnost. Používejte pouze tolik hmotnosti, kolik je potřeba pro dosažení požadovaného uklidňujícího účinku. Doporučujeme zvolit deku se zátěží, která představuje přibližně 10 až 15 % hmotnosti chlapce
2. Neustále dohlížejte. Nikdy nezakrývejte hlavu ani obličej dítěte. Pokud se používá před spaním, pečlivě dítě sledujte a po usnutí deku odstraňte. Vzhledem k hmotnosti se pro optimální výsledky doporučují krátké 15–20minutové sezení.
3. Dovolte volný pohyb. Deku není omezujícím prostředkem – vaše dítě by si ji mělo být schopno kdykoli samo sundat.

4. Nepoužívejte u dětí ani dospělých s:

- Astma nebo dýchacími potížemi
- Rozštěpem páteře nebo jinými onemocněními křehkých kostí/kůže
- Cukrovkou, problémy s krevním oběhem nebo otevřenými ranami
- Poruchami krevního tlaku (hypertenze nebo hypotenze)

Pokyny pro péči

Očistěte povrch vlhkým hadříkem nebo perle v ruce/pračce na jemný program ve studené vodě. Důkladně opláchněte ve studené vodě. Nechte uschnout naplocho – nesušte v sušičce